

# 数智医疗影像平台

## 快速入门

## 产品文档



**【版权声明】**

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

**【商标声明】**

 Tencent Cloud

及其他腾讯云服务相关的商标均为腾讯集团下的相关公司主体所有。另外，本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

**【服务声明】**

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

# 文档目录

快速入门

PC 端

移动端

# 快速入门

## PC 端

最近更新时间：2025-03-13 16:27:29

### 简介

数智医疗影像平台拥有丰富的医学影像应用功能、人工智能辅助诊断、强大的影像浏览工具，满足医疗行业院内、院间互联互通、降本增效的全场景需求。本文带您快速了解数智医疗影像平台在 PC 端的操作与使用。

### 注册和登录

#### 注册

医联体管理员账号请联系腾讯觅影工作人员后台为您开通。普通用户账号请联系您所属机构的管理员为您添加开通。

#### 登录

数智医疗影像平台提供多种登录方式供您选择，您可以选择**账号密码登录**、**扫码登录**。当您第一次登录时，需要扫码关注腾讯觅影公众号完成手机号验证绑定，并设置初始登录密码才可以登录成功。若您是机构管理员，请在登录页单击**管理员登录**可切换至管理平台登录。

#### 远程诊断

登录成功后，您即进入数智医疗影像云平台主界面，在该页面您可以进行远程诊断，同时显示您所属医疗机构上传至云端的患者信息和检查列表。

#### 影像浏览

在检查列表双击任意检查，即可进入该检查的影像浏览页面浏览患者影像。

#### 报告编辑

在检查列表操作栏单击任意检查的**报告**，即可进入该检查的报告编辑页面。

- **报告编辑**：用户可进行报告编辑、保存。
- **报告审核**：有权限的用户可进行报告初诊、审核、打印。
- **对比影像**：用户可选择多个检查进行对比影像。
- **插入知识库词条**：用户可将报告知识库的词条插入至报告正文。

#### ⓘ 说明：

一个检查报告同时仅允许一个用户编辑，当您正在编辑时将锁定该报告的编辑状态至您名下。保存或审核后  
将释放编辑状态，或连续30min无操作系统将自动释放编辑状态。

## 检查管理

用户在检查列表可进行检查管理：

- **检查筛选**：用户可快捷筛选检查日期。
- **检查排序**：检查列表支持按检查时间、打印时间进行倒序、正序排序。

## 远程会诊

用户在数智医疗影像云平台导航栏单击**远程会诊**可进入远程会诊列表，在该页面您可以进行院内或跨院间的多学科会诊。

## 创建会诊

用户在会诊列表单击**创建会诊**即可进入创建会诊的页面：

- **邀请对象**：用户可从通讯录选择会诊科室或会诊对象，并可选择必须参加的对象。所有必须参加的科室必须审核同意后，会诊才会拉取成功。
- **会诊资料**：用户可通过患者证件号、HIS 号关联云端的患者信息、检查信息至当前会诊。也支持从本地上传文件。

## 会诊审核

用户在会诊审核列表可进行会诊审核，前提是用户具备审核权限：

- **调剂专家**：审核用户在会诊审核页面单击**调剂专家**，可修改调剂科室的参会专家。
- **审核会诊**：审核用户可单击**同意并参会**、**同意**、**拒绝**进行会诊审核。

## 加入会诊

会诊审核完成后，所有被邀请的参会人员可在会诊列表可加入会诊：

- **会诊室**：所有参会人员单击**查看会诊**可进入会诊室，查看会诊信息、患者信息、云端资料、上传资料、会诊流程等信息。用户单击**查看影像**可浏览 DICOM 影像，单击**影像报告**可查看当前云端影像对应的报告内容。
- **音视频会诊**：所有参会人可单击**开启音视频会诊**进入腾讯会议开始会诊，系统将自动引导跳转至腾讯会议。
- **会诊报告**：所有参会人均可在会诊室内编辑会诊报告。单击**编辑**后激活报告编辑进行内容撰写，完成后可进行保存、提交、打印。

## 大语言模型 AI 报告

数智医疗影像云平台为用户提供大语言模型 AI 报告能力，用户在编辑诊断报告时，可通过大语言 AI 模型进行报告内容疾病解读、历史报告比对、报告质控纠错。

- **报告疾病解读**：通过将诊断报告输入大语言 AI 模型，生成针对报告疾病的含义解读，并针对疾病输出健康建议；
- **历史报告比对**：通过将同一患者同类型的历史诊断报告调用大语言模型，进行历史报告总结和病情变化比对总结，以便医生快速提炼病情变化；
- **报告质控纠错**：通过将诊断报告输入至模型将报告中的错别字进行检出，并智能纠错以便提高报告书写质量。

## 平台管理

数智医疗影像平台为管理者提供强大的管理平台，用户登录至数智医疗影像平台管理端默认进入当前机构首页，可进行如下操作：

- **医院管理**：管理员可查看机构信息、存储用量情况、资源续费记录、医院 logo 自定义、医院二维码下载等操作。
- **医生管理**：管理员可进行机构内人员的配置。
- **检查管理**：管理员可管理院内检查属性的配置，包括设备类型、设备管理、部位类型、检查项目的配置。
- **报告管理**：管理员可配置各学科的检查报告模板，包括页眉、正文、页脚、标题等格式的配置。
- **云胶片配置**：管理员可配置云胶片生效时机的配置。
- **数据管理**：管理员可进行云端检查的归档与取回管理。
- **通知管理**：管理员可配置消息通知的属性，包括消息类型、通知方式、通知范围、通知时机等。
- **日志审计**：管理员可查看平台所有的日志信息，包括检查日志、用户日志、会诊日志、数据维护等。

# 移动端

最近更新时间：2025-03-07 17:07:28

## 简介

数智医疗影像平台拥有丰富的医学影像应用功能、人工智能辅助诊断、强大的影像浏览工具，满足医疗行业院内、院间互联互通、降本增效的全场景需求。阅读本文您将快速了解数智医疗影像平台在移动端的操作与使用。

## 前提条件

推荐安装手机 QQ 浏览器、腾讯会议 App (iOS 或 Android)

## 注册和登录

### 注册

医联体管理员账号请联系腾讯觅影工作人员后台为您开通。普通用户账号请联系您所属机构的管理员为您添加开通。

### 登录

在移动端访问数智医疗影像平台，进入账号密码登录页面。您可输入**账号密码登录**，当您第一次登录时，需要设置初始登录密码才可以登录成功。如果您的机构已开通企业微信应用，您可在企业微信的工作台找到**腾讯觅影影像云**的应用入口。

## 远程诊断

登录成功后，您即进入数智医疗影像云平台移动端主界面，在该页面您可以选择功能模块，包括本院诊断、远程诊断、远程会诊、远程查房。

## 影像浏览

在检查列表双击任意检查，即可进入该检查的影像浏览页面浏览患者影像。

### 说明：

- 当您的设备在连接移动网络时，查看 DICOM 影像时将默认加载缩略图，避免花费较多的网络流量。您也可以单击**查看原图**加载原始影像大小。
- 当您的设备在连接 WIFI 网络时，系统将默认加载原始 DICOM 影像。

## 报告编辑

在检查列表操作栏单击任意检查的**报告**，即可进入该检查的报告编辑页面。

- 报告编辑**：用户可进行报告编辑、保存。
- 报告审核**：有权限的用户可进行报告初诊、审核。

- **分享检查**：用户可将检查通过企业微信分享至同机构的同事。

#### ❗ 说明：

一个检查报告同时仅允许一个用户编辑，当您正在编辑时将锁定该报告的编辑状态至您名下。保存或审核后  
将释放编辑状态，或连续30min无操作系统将自动释放编辑状态。

## 检查管理

用户在检查列表可进行检查管理：

- **检查筛选**：用户可通过各种条件筛选检查，包括检查状态、设备类型、检查类别、扫描方式等。
- **关键字搜索**：用户可通过患者姓名、患者 ID 等关键字进行检查搜索。

## 远程会诊

用户在数智医疗影像云移动端首页单击**远程会诊**可进入远程会诊列表，在该页面您可以进行院内或跨院间的多学科会诊。

## 创建会诊

用户在会诊列表单击**创建会诊**即可进入创建会诊的页面：

- **邀请对象**：用户可从通讯录选择会诊科室或会诊对象，并可选择必须参加的对象。所有必须参加的科室必须审核同意后，会诊才会拉取成功。
- **会诊资料**：用户可通过患者证件号、HIS 号关联云端的患者信息、检查信息至当前会诊。也支持从本地上传文件。

## 会诊审核

用户在会诊审核列表可进行会诊审核，前提是用户具备审核权限：

- **调剂专家**：审核用户在会诊审核页面单击**调剂专家**，可修改调剂科室的参会专家。
- **审核会诊**：审核用户可单击**同意并参会**、**同意**、**拒绝**进行会诊审核。

## 加入会诊

会诊审核完成后，所有被邀请的参会人员可在会诊列表可加入会诊：

- **会诊室**：所有参会人员单击**查看会诊**可进入会诊室，查看会诊信息、患者信息、云端资料、上传资料、会诊流程等信息。用户单击**查看影像**可浏览 DICOM 影像，单击**影像报告**可查看当前云端影像对应的报告内容。
- **音视频会诊**：所有参会人可单击**开启音视频会诊**进入腾讯会议开始会诊，系统将自动引导跳转至腾讯会议。
- **会诊报告**：所有参会人均可在会诊室内编辑会诊报告。单击**编辑**后激活报告编辑进行内容撰写，完成后可进行保存、提交、打印。

## 患者影像档案

数智医疗影像平台为用户提供**患者影像档案**（微信小程序）管理个人医学影像和检查，实现一部手机随时查看、长期存储安全可靠。

## 登录

用户在微信小程序搜索**患者影像档案**可进入登录页，通过微信授权手机号完成注册并进入首页，也可扫描小程序二维码进行登录。

## 成员管理

用户登录完成后，需进行个人信息完善并进行实名验证，以便自动匹配云端的检查。

- **个人信息完善**：用户在**我的 > 成员管理**中完善个人信息，其中姓名、证件号码为必填项以便进行身份核验。
- **多成员管理**：用户在**我的 > 成员管理**中单击**添加成员**可添加家庭成员，完善成员信息并验证后，可查看成员云端的影像检查。

## 查看检查

用户完善个人或成员信息并验证后，系统会自动匹配云端检查，用户也可手动检索自己的检查。

- **查看检查**：用户完善个人信息后，系统会自动通过证件号或手机号匹配用户云端的检查。用户在检查列表单击检查即可浏览自己的检查报告和影像。
- **分享检查**：用户在查看个人检查时，可单击**分享**将检查分享给微信好友。分享时，用户可设置分享检查的有效期、密码，保护个人隐私安全。
- **下载检查**：用户在查看个人检查时，可单击**下载**将检查的原始 DICOM 影像下载至本地。下载时，用户需在链接有效期内通过输入安全码进行下载。
- **手动匹配**：如果用户无法查看个人的检查，可尝试通过检索检查 ID、检查日期、机构名称手动搜索检查并匹配至个人名下。

### 📌 说明：

用户首次完善个人信息后，必须先进行一次手动检查匹配进行校验。匹配成功后，系统会自动拉取该用户云端的所有检查。